

Трейдлифтинг


Мезонити

- ✓ Высокое качество
- ✓ Широкий ассортимент
- ✓ Лучшая цена



Технология

- Игла-проводникам с двойной лазерной заточкой: уникальная двойная лазерная заточка иглы, в том числе и ее задней поверхности позволяет более мягко, легко и безболезненно вводить иглу в ткани
- Нити сделана из материала ПОЛИДИОКСАНОН (PDX) и покрыта полигликолевой кислотой (ПГА)

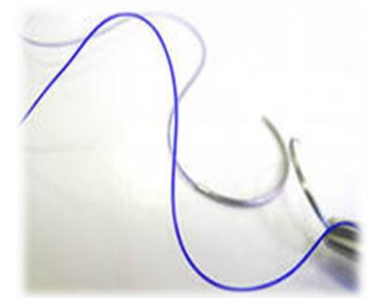

Размер нитей, область воздействия

25мм (30G) - лицо, область вокруг глаз

35мм (30G) - лицо, область вокруг глаз

38мм (29G) - лицо

45мм (29G) - лицо, тело

50мм (29G) - лицо, тело

60мм (27G) - лицо, тело

65мм (27G) - лицо, тело

70мм (27G) - тело

90мм (26G) - тело



Какие бывают ВИДЫ МЕЗОНИТЕЙ?




Новинка!

Мезонити с нанопокрытием из ВЮ

золота

Мезонити GOLD состоят из безопасного материала полидиоксанона

И покрыты наночастицами золота (99,93%), биосовместимыми с человеческим организмом. Толщина самой нити при этом остается прежней, а результат увеличивается в сотни раз. ВЮ нить абсорбируется образуя микрофибров в течении года и вызывает длительный эффект

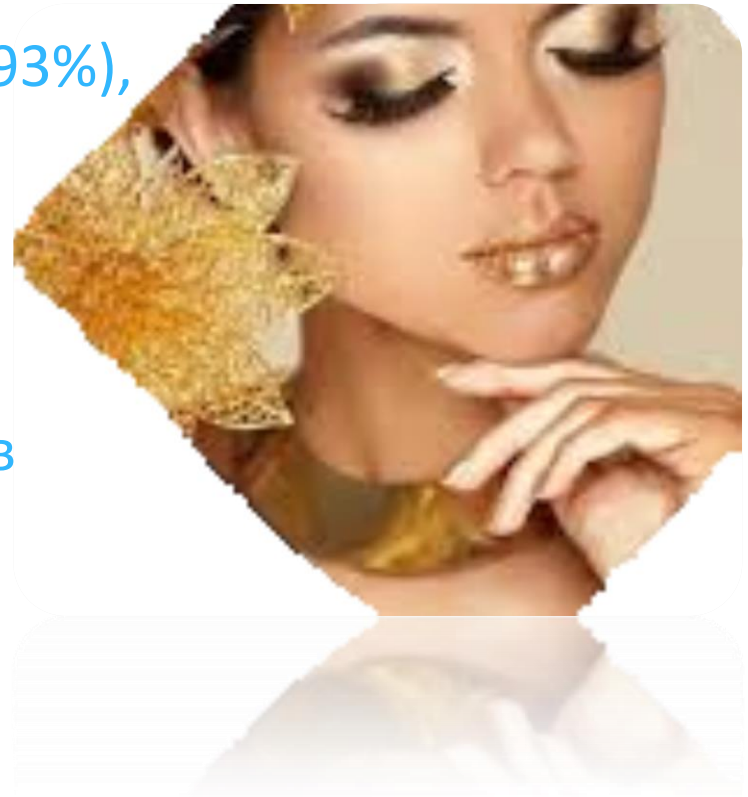

Результат высшей пробы:

- Максимальный эффект лифтинга за счет наночастиц золота, которые продлевают результат от процедуры и делают его более заметным
- Улучшение цвета и качества кожи
- Повышение барьерной функции кожи
- Улучшение микроциркуляции и метаболизма кожи
- Вызывают ретракцию жировых клеток (липолитический эффект)



Биодegradация мезонитей в коже

1 этап(в среднем 30-60 дней):

- распад полигликолевой кислоты (покрытие нити);
- утилизация гликолевой кислоты естественным путем с высвобождением энергии;
- улучшение метаболизма.



Биодеградация мезонитей в коже

2 этап (в среднем 180 дней):

- ферментативный гидролиз полимера полидиоксанона (C₄H₆O₃) на мономеры:

2-гидроксиэтоксисуксусная кислота

свободные функциональные моногруппы

(данный процесс проходит с участием большого количества воды (противоотечный эффект);

- формирование фиброза и образование нового коллагена вокруг нитей.

Виды действия нитей

- Поддерживающее кожу
- Уплотняющее ткань
- Подтягивающее контуры лица

Глубина введения и результат:

Внутрикожно – эффект ревитализации.

Подкожно жировая клетчатка – ретракция жировой ткани.

Механизм действия

- Клетки начинают выделять собственные факторы роста и медиаторы воспаления
- Формирование микрофиброза. Вокруг нити появляются новые коллагеновые волокна
- Образование новых капилляров в течении 210-240 дней(пока идет резорбция нити)



Варианты постановки нитей

➤ В соответствии с линиями Лангера



➤ По линиям , которые начинаются в проекции реперных точек (область мандибулярной связки, точка МакГрегора, угол нижней челюсти)

Нити для врачей косметологов

Полидиоксанон (ПДО)

Давно используются

Безопасны

Совместимы с тканями

Период рассасывания – 140-200 дней

Отсутствие серьезных осложнений

Имплантация на разных уровнях – дермальном, субдермальном, внутримышечном, на надкостнице

Полимолочная кислота (ПМК)

Период рассасывания – 60-90 дней

Риск нежелательных явлений (формирование узелковых изменений в коже)

Высокая себестоимость

Отсутствие разнообразия по толщине и длине

Показания к применению

Тело:

- Провисание груди
- Омоложение шеи и декольте
- Омоложение кожи на животе
- Лифтинг ягодиц
- Лифтинг внутренней поверхности рук
- Лифтинг внутренней поверхности бедер
- Коррекция мышц ягодиц
- Коррекция мышц груди

Лицо:

- Морщины в области лба
- Межбровные морщины
- Морщины вокруг губ и глаз
- Гравитационный птоз
- Коррекция нижней трети лица

Противопоказания

Аутоиммунные заболевания;
Заболевания крови, гемофилия;
Коллагенозы;
Ишемическая болезнь сердца;
Психические и невротические нарушения;
Наличие злокачественных новообразований;
Заболевания кожи в области проведения процедуры;
Ранее введенные не биodeградирующие инъекционные имплантаты в зоне проведения процедуры;
Беременность и лактация.

Возможные осложнения

Гематомы

Болезненность в течении 2-3 дней

Отек в некоторых случаях до 10-14 дней

Методика применения

- однократное введение нитей ;
- двукратное введение нитей;
- трехкратное введение нитей.

Интервал между процедурами 4-8 недель

Почему нет эффекта?

- Коррекция только одной зоны;
- Недостаточное количество нитей;
- Неправильная постановка нитей;
- Применение только одной методики для лифтинга.

Сочетание мезонитей с другими процедурами

- Сочетание мезонитей и RF-лифтинга в одной процедуре;
- Проведение RF- лифтинга за 2-3 недели до мезонитей;
- Проведение мезотерапии через неделю после мезонитей;
- Проведение контурной пластики через 20 дней после постановки мезонитей;
- Возможно проведение процедуры фототерапии при необходимости через 1,5-2 месяца.



Спасибо за внимание!

